



# Kom igång med TYR<sup>®</sup>

**OnDeMove AB**  
Fiskaregatan 17  
302 90 Halmstad

[www.ondemove.se](http://www.ondemove.se)  
[info@ondemove.se](mailto:info@ondemove.se)  
035 - 777 18 01




# Innehåll


Viktigt att veta om hörsel	3
Vad ingår till TYR®	4
Tillvänjning	5
Ladda TYR®	6
Testa ut hörlursproppar	7
Bära TYR®	8
Översikt	10
Starta TYR®	12
Börja använda TYR®	13
Välj program	14
Programlägen	15
Hur du kan svara i telefon	16
Made in Sweden	17
Kontakta oss	18
Teknisk information	19


## Teknisk information


Audio bandbredd:	12 500 Hz
Max utnivå:	125 dB SPL
Antal användarprogram:	3
Max laddningsström på USB-ingång:	500 mA
Max laddningstid:	2 timmar
Nominell drifttid:	upp till 45 timmar
Batterityp:	Li-Polymer
Arbetstemperatur:	-20° till +45 °C
Dimensioner LxBxH:	70x40x13mm
Vikt:	39 gram

## Varningar


 **TYR®** måste användas tillsammans med tillhörande hörlurar. Användning av andra hörlurar leder till sämre prestanda och kan i vissa fall leda till hörselskador.


 För att undvika obehagliga ljudupplevelser bör volymen ökas med försiktighet.


 En trasig **TYR®** ska returneras till auktoriserat servicecenter. Försök inte reparera enheten eller komponenterna själv.

 Använd endast godkända delar och tillbehör från OnDeMove AB (publ). Ändringar eller modifieringar som inte godkänts av OnDeMove AB (publ) upphäver garantin.

## Symbolförklaringar

 OnDeMove AB (publ) förklarar härmed att detta hörseltillbehör överensstämmer med europeiska myndighetskrav.

 Denna produkt innehåller elektronikkomponenter och uppladdningsbart batteri. Återvinning av denna produkt ska göras enligt lokala föreskrifter.

 För korrekt användning av denna produkt är det viktigt att du läser denna bruksanvisning innan du använder produkten.

## Har du frågor eller vill ha mer hjälp för att komma igång?

Vi finns här för dig. Oavsett om du vill prata med oss eller skriva till oss. Eller kanske komma förbi oss på en kopp kaffe?

**035 - 777 18 01**

Under helgfria vardagar kan du ringa till oss och få personlig service.

**info@ondemove.se**

Vår mailkorg har öppet dygnet runt. Vi svarar så fort vi kan under helgfria vardagar.


## Fiskaregatan 17

Vägarna förbi Halmstad?  
Välkommen på en kopp kaffe så pratar vi hörhjälpmedel!

## Viktigt att veta om hörselhjälpmedel

Normalt sker en försämring av hörseln under lång tid. Hörseln blir successivt sämre.

I och med att försämringen sker över lång tid så hinner man ofta vänja sig vid sämre hörsel. Det gör att det kan kännas väldigt ovant när man provar hörselhjälpmedel om man inte har använt det tidigare. Helt plötsligt hör man saker som man hunnit vänja sig av med.

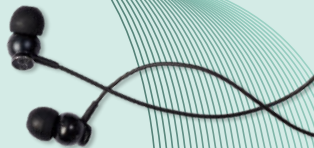

**Glöm inte att hörhjälpmedel aldrig kan ersätta två friska öron.**

Ljudet uppfattas annorlunda via ett hörhjälpmedel än genom ett par friska öron.

# Vad ingår till TYR®?



TYR®



Hörlurar



Öppna & täta  
hörlursproppar  
strl S, M och L



Halsband

Bruksanvisning



Micro USB-kabel



# Made in Sweden

Hörsel förstärkaren TYR® är en svensk innovation.

Vi är mycket stolta över att vår utveckling och produktion sker på västkusten i Sverige.



MADE IN  
SWEDEN

Hör det du vill - gör det du vill.  
Med svensk kvalite.



## Svara i telefon

Att svara i telefon med **TYR**<sup>®</sup> är inga konstigheter.



*För privatere samtaler kan du vända på telefonen för att få förstärkt ljud.*

## På högtalare

Sätt på telefonens högtalare.  
**TYR**<sup>®</sup> förstärker automatiskt ljudet.

## För privatere samtaler

Om du vill eller behöver hålla ditt samtal mer privat svarar du som vanligt i telefonen, men vänder den upp och ner riktad mot **TYR**<sup>®</sup>. Då går samtalsljudet in i hörsel förstärkaren och du pratar in i telefonens mikrofon.

## Tillvänjning är a och o



## Förstagångsanvändare av hörhjälpmiddel?

Det krävs alltid lite tillvänjning av hörhjälpmiddel. I början kan det kännas ovant, men ha tålamod.

Låt det vara ovant, och ge inte upp.

# Ladda TYR®

Kontrollera att **TYR®** är avstängd. Anslut USB-kabelns lilla kontakt till USB-ingången. Anslut USB-kabelns andra kontakt till en nätadapter eller i en dators USB-uttag.

Avstängd position.



USB-ingången är i botten av **TYR®**.

- ● ● Laddning pågår
- ● ● Batteriet är fulladdat
- ● ● Blinkar när den är urladdad

Vid en ny laddning kommer det initialt alltid att lysa rött, även om **TYR** är fulladdad. **TYR** gör alltid en hälsoscheck innan den indikerar att den är fulladdad.



Märkningen på USB-kabeln ska vara uppåt.

**Batteritid: upp till 45 timmar**  
**Laddningstid: 1,5 timma**

Anslut denna USB-A till en nätadapter eller dator.  
*Nätadapter ingår inte.*

Exempel på en nätadapter.  
*Oftast fungerar nätadaptern som du använder till din mobiltelefon.*

# Programlägen

Lär dig de tre programlägena för maximal ljudkvalite i olika ljudsituationer.

*Program 1 -*  
**samtal & tv-tittande**

Luta dig tillbaka i soffan - nu kan alla lysna på samma volym.



*Program 2 -*  
**föreläsning, möte, teater, bio**  
Räckvidd på upp till 20 meter.



*Program 3 -*  
**restaurang, familjemiddagar**

För bullriga miljöer. **TYR®** plockar upp ljud på ett avstånd om 1,5 meter och minimerar bakgrundsljud.



## Välj program

TYR® har tre förkonfigurerade användarprogram. Genom att klicka på programknappen stegar du igenom programmen.



TYR® startar alltid i program 1 när den slås på.

### Programvals knapp

Antal toner du hör indikerar vilket program du använder.



## Testa ut hörlursproppar

Rätt storlek på hörlurspropparna är viktigt. Prova ut din storlek.

Hörsel förstärkaren levereras med öppna och slutna hörlursproppar i storlek S, M och L.



Sluten tät hörlurspropp

För bullriga miljöer



Mindre egen röst

Öppen ventilerande hörlurspropp

## Anslut hörlurarna

Anslut medföljande hörlurar till hörlursutgången, som är på toppen av TYR® genom att trycka i kontakten så långt det går. Den ska botten i hörlursutgången för att säkerställa god kontakt och funktion.



## Bära TYR®

Hörlurarna har markering för höger (R) och vänster (L) öra. Du kan välja att använda **TYR®** med halsbandet som medföljer eller med den roterbara klämman på baksidan av **TYR®**. Om du rör dig mycket rekommenderar vi att du använder klämman för att minimera rörelseljud.



Det magnetiska halsbandet fästs på baksidan av **TYR®**.



## Börja använda TYR®

Redo att förstärka din hörsel? Vi har några rekommendationer när du börjar använda **TYR®**.

### Första veckan

Låg volym.  
Använd ca en timma om dagen.

### Andra veckan

Höj volymen successivt.  
Använd ett par timmar om dagen.

### Därefter

Använd **TYR®** utan någon tidsbegränsning.

**TYR® har 16 volymsteg**

Höj volymen på mittenknappen

*För att verkligen ge hörsel förstärkaren en riktig chans så bör du använda den i 3-4 veckor. Ge **TYR®** en ärlig chans och upptäck successivt världen på nytt!*



## Starta TYR®

Skjut upp strömbrytaren för att starta enheten. Batteriindikatorn lyser konstant blått.



Påslagen position

●●● Lyser konstant



Om du använder hörapparat, plockar du ur den när du ska använda TYR®. Du kan inte koppla upp din hörapparat till TYR®.



### Upplever du att sladden är lång?

Dra hörlurssladden bakom nacken. Om du använder skjorta kan du dra hörlurssladden genom skjortkragen.

Se till att TYR®-enheten inte täcks av kläder eller annan textil för bästa ljudupptagning.

# Översikt

## Hörlursutgång

Tryck i hörlurskontakten ordentligt.

## På och av-knapp

Skjut upp knappen för att starta.

## Programval

Antal toner du hör indikerar vilket program du använder.

## Höj volymen

Det finns 16 volymsteg.  
Startar alltid i volymläge 5.

## Sänk volymen



Ljudupptagning  
Rör inte och håll inte för.

USB-ingång  
för laddning.