


# Visit väckarklocka



BE1580

## Knappar och reglage

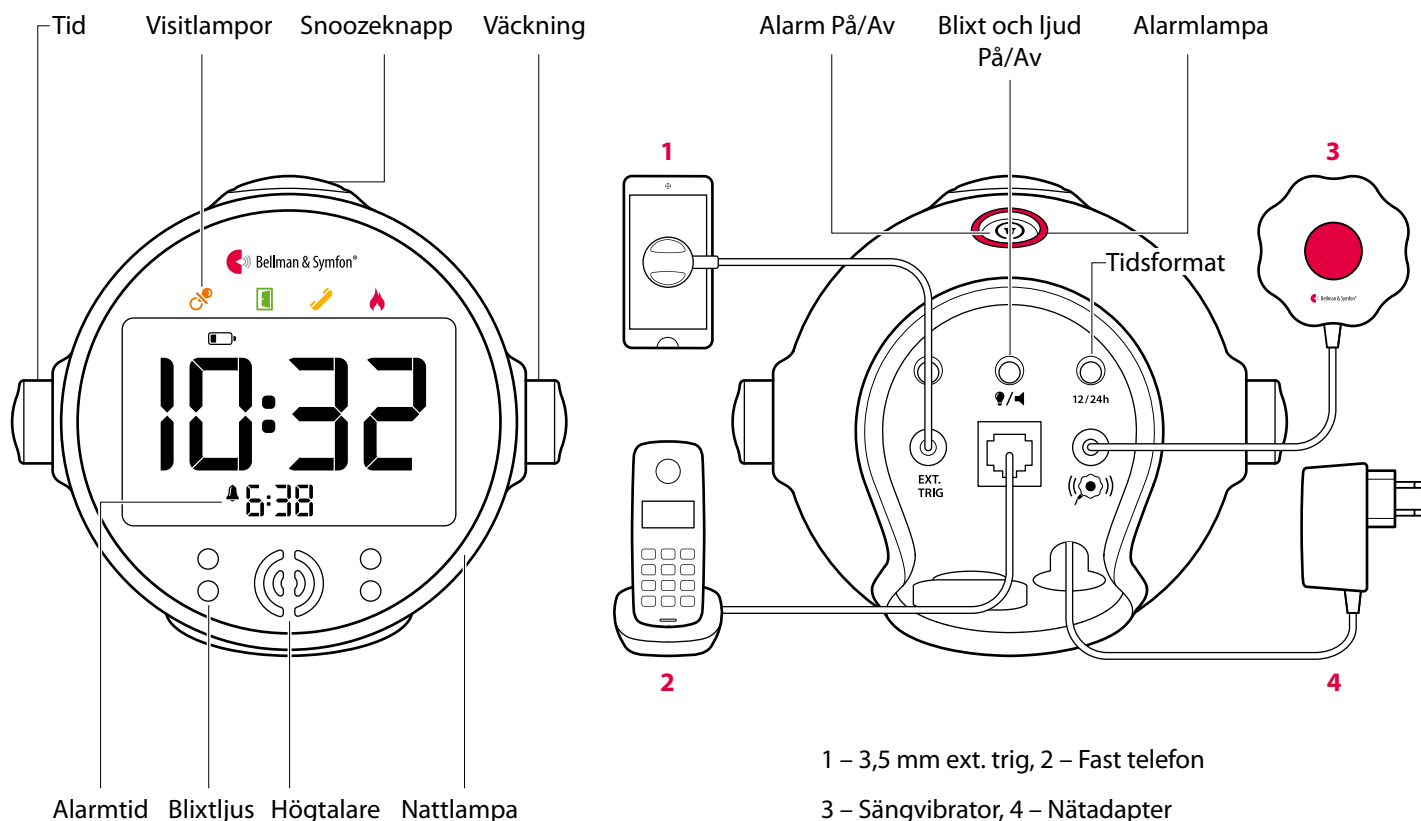

Alarmtid Blixtljus Högtalare Natllampa

1 – 3,5 mm ext. trig, 2 – Fast telefon

3 – Sängvibrator, 4 – Nätadapter

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1272 Sängvibrator med ljud
- Nätadapter
- 4 x 1,2 V AAA NiMH-batterier

### Storlek och vikt

- Höjd: 108 mm
- Bredd: 121 mm
- Djup: 92 mm
- Vikt: 390 g, inkl. batterier

### Signaler

- Ljudsignal  
100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Fyra högintensiva LED-blixtar
- Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC  
Sängvibratören avger ett ljud

### Ström och batteri

- Strömförsörjning  
7,5 V DC / 1000 mA  
Extern nätadapter
- Batterireserv  
4 x 1,2 V AAA NiMH  
uppladdningsbara batterier
- Drifttid, batterireserv  
~ 24 h vid fullt laddat batteri
- Laddningstid, batterireserv  
~ 10 h vid helt urladdat batteri

### Visitlampor

Visitlamporna indikerar normalt följande:

- Orange lampa, nappsymbol  
Babyvakten är aktiverad
- Grön lampa, dörrsymbol  
Dörrsändaren är aktiverad
- Gul lampa, telefonsymbol  
Telefonsändaren är aktiverad
- Röd lampa, brandsymbol  
Brandvarnaren är aktiverad

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens  
868.30 MHz
- Räckvidd  
50 - 250 m beroende på  
byggnadens konstruktion och  
planlösning


### Tillbehör

- BE1271 Sängvibrator utan ljud
- BE9250 Mobilsensor

# Visit väckarklocka

## Komma igång

- 1 Dra bort batterifliken och anslut nätadaptern till väckarklockan och vägguttaget. Anslut sängvibratorn, lägg den under kudden eller madrassen och ställ väckarklockan på nattduksbordet.
- 2 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.
- 3 En Visitlampa tänds på väckarklockan och den börjar ljuda och blixtra. Sängvibratorn vibrerar och avger ett ljud. Om ingenting händer, se **Felsökning**.

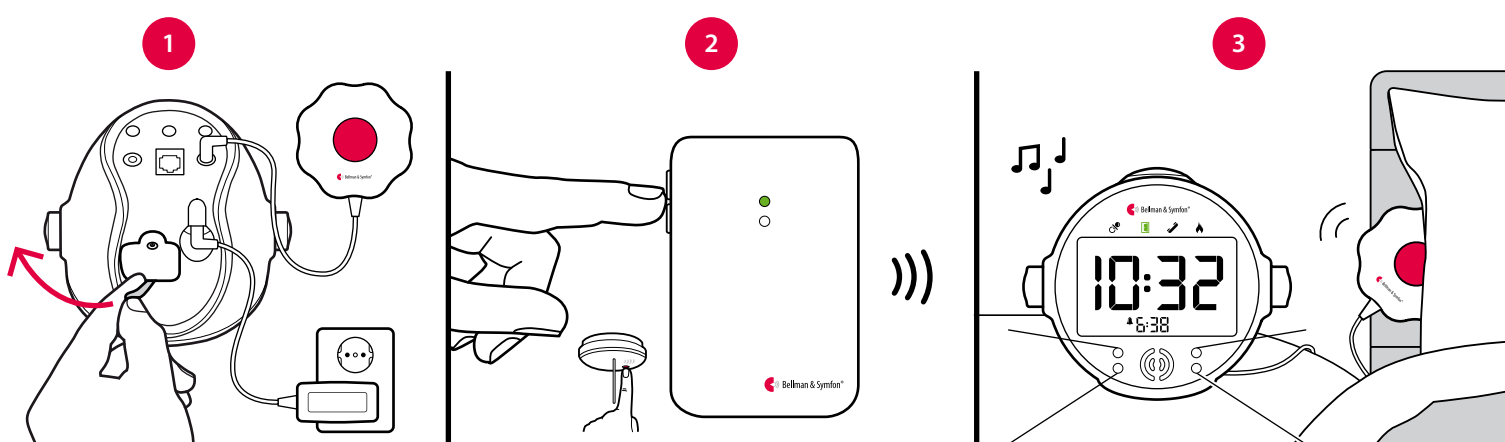

## Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras börjar väckarklockan ljuda och blixtra och sängvibratorn vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare	Väckarklocka			Sängvibrator
<b>Aktiverad källa</b>	<b>Visitlampa</b>	<b>Ljud</b>	<b>Blixt</b>	<b>Vibration</b>
▪ Dörrensändare/ tryckknappssändare	Grön	Dörrklocka	Ja	Långsam ■□□□
▪ Telefonsändare / ansluten telefon	Gul	Ringsignal	Ja	Mellan ■□■□
▪ Babyvakt	Orange	Babymelodi	Ja	Snabb ■■■■■□
▪ Brandvarnare	Röd	Brandlarm	Ja	Lång ■■■■□

## Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

## Inställningar

### Blixt och ljud På/Av

Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med på baksidan av väckarklockan för att växla mellan alternativen. När blixtljuset är avstängt ser du en -symbol på urtavlan. När ljudet är avstängt syns en -symbol.

### Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen för bakgrundsbelysning markerad med på baksidan av väckarklockan för att justera ljuset i fem steg.


### Tidsformat

Tryck på knappen markerad med **12/24h** på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.

# Visit väckarklocka


## Ställa tiden

Tryck på det **vänstra** vredet och vrid för att ställa in timmar.  
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.  
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

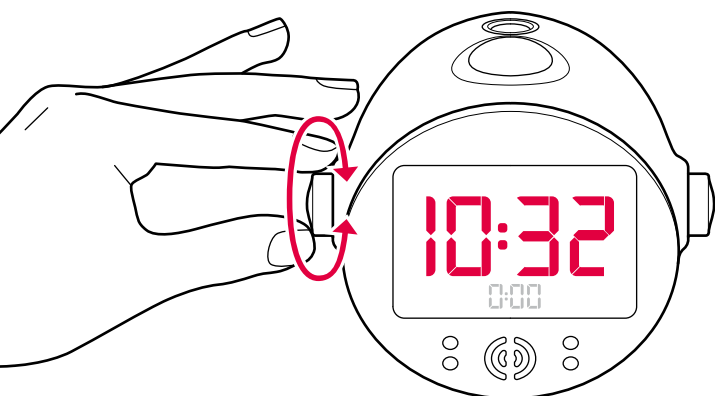


## Ställa alarmet

Tryck på det **högra** vredet och vrid för att ställa in timmar.  
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.  
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

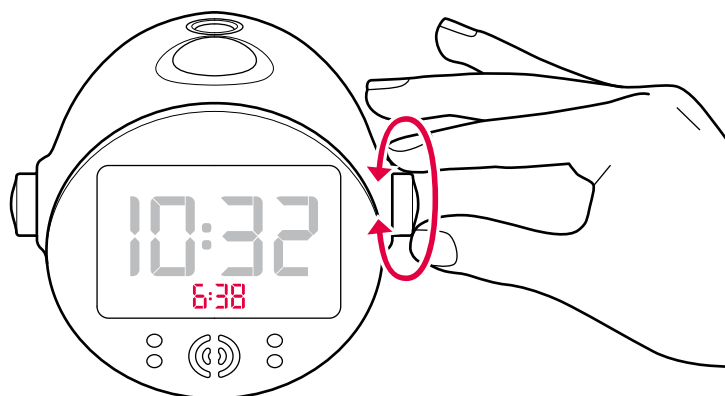


## Aktivera alarmet

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet.  
Alarmlampan tänds i rött. För att stänga av alarmet,  
tryck på knappen igen.

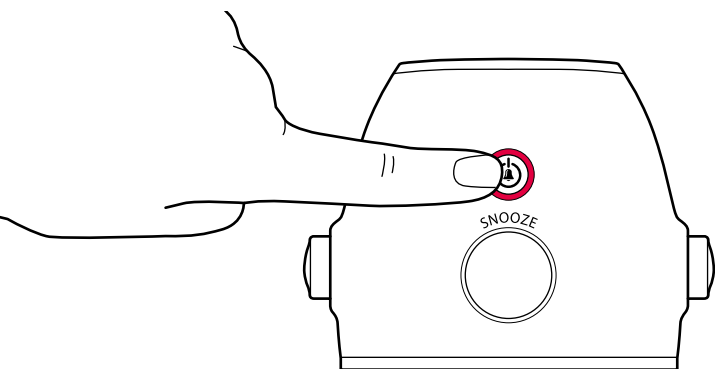

## Använda snooze och nattlampa


Tryck på snooze-knappen för att snooza.  
(Brandlarm kan inte snoozas av säkerhetsskäl).  
Tryck och håll nere snooze-knappen i 3 s för att tända  
nattlampan. För att släcka den, tryck på knappen igen.

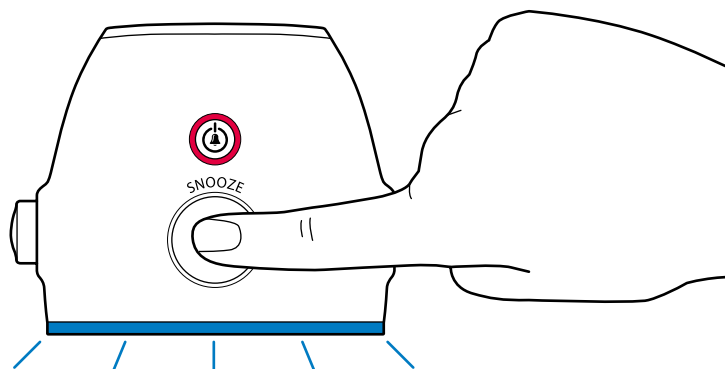

## Tillbehör

Väckarklockan kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE9250 Mobilsensor**  
Ställ den på mobilen eller surfplattan så visar väckarklockan när du får ett inkommande samtal eller meddelande.
- **BE9105 Telefonsladd**  
Använd den för att ansluta din fasta telefon till väckarklockan så väcker den dig när telefonen ringer.
- **BE9024 Trampmatta**  
Anslut trampmattan till väckarklockan så väcker den dig om din partner kliver ur sängen.

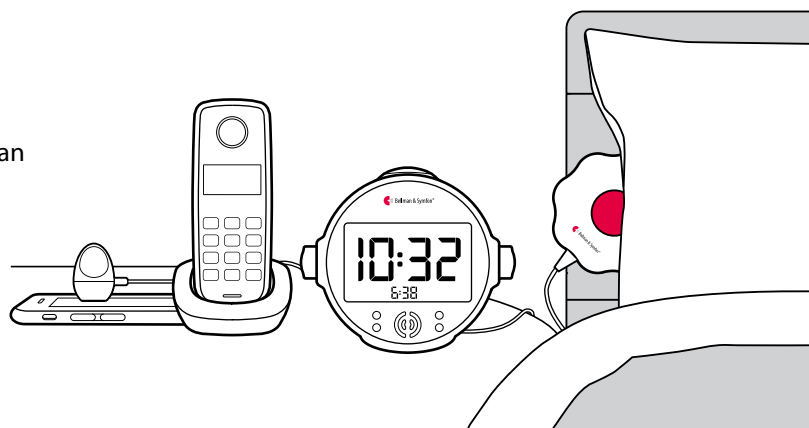


# Visit väckarklocka

## Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på **sändarna**.

### Så här byter du radionyckel:



- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (På) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
- 2 Tryck och håll nere snooze-knappen på väckarklockan tills den gröna och gula Visitslampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitslamporna på klockan blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

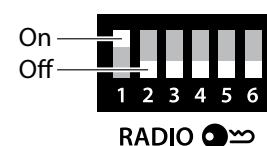

**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

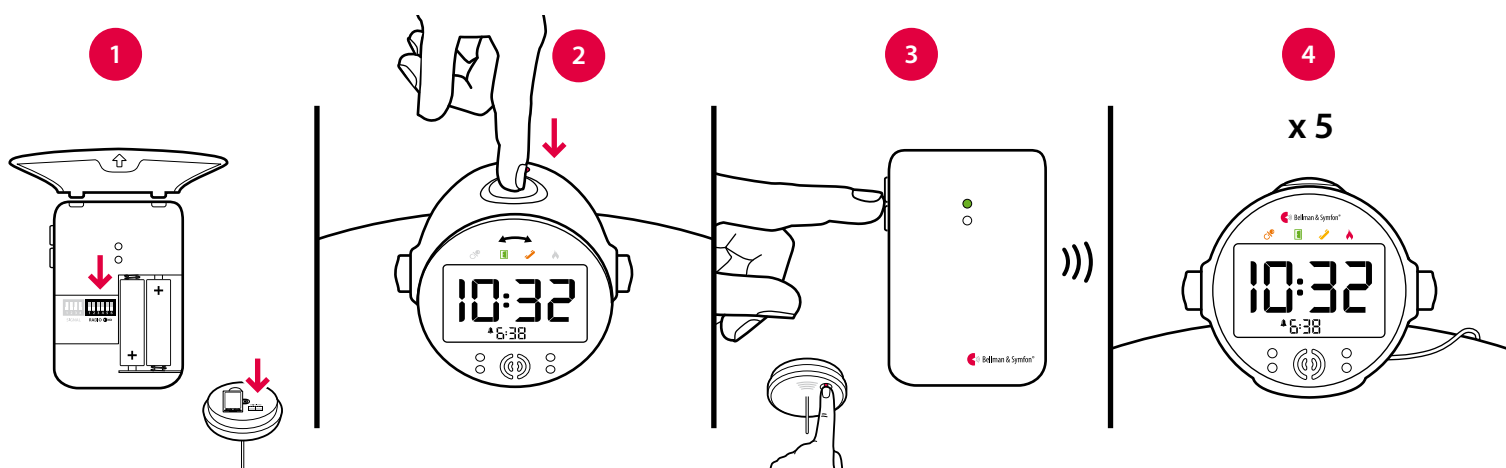

## Felsökning

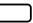Om	Gör så här
Väckarklockan verkar vara avstängd	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att nätadapern är ansluten i väggutaget.</li><li>▪ Ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>
Urtavlans  -symbol börjar blinka	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade. Anslut nätadaptern i väggutaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Väckarklockan detekterar inga resevbatterier. Dra bort batterifliken, se <b>Komma igång</b>.</li></ul>
Väckarklockan reagerar inte när en sändare aktiveras	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar.</li><li>▪ Flytta väckarklockan närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>▪ Kontrollera att väckarklockan har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>
Väckarklockan aktiveras utan någon anledning	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din väckarklocka. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>
Ljudet för väckning är för lågt	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.</li></ul>