

BST-100

Bluetooth-högtalare med ljudterapi

Bruksanvisning



Innehåll

I förpackningen:	3
Strömförsörjning	7
Spela upp musik via Bluetooth	8
Lyssna på ljud/musik från micro-SD-kortet	8
Använd ett annat micro-SD-kort	9
Använd som telefonhögtalare	10
Underhåll och skötsel	11
Miljö	11
Service	11
Teknisk information	11

I förpackningen:

- BST-100, Sound Oasis Bluetooth Sleep Sound Therapy System
- Micro-SD-kort med ljudspår
- USB-laddningskabel
- Bruksanvisning (engelska)






Viktigt!



- Läs alla instruktioner.
- Utsätt inte produkten för regn och fukt. Undvik att spilla vätskor i högtalaren, då det kan orsaka kortslutning och medföra brandfara.
- Placera ej högtalaren i närheten av eld, såsom tända ljus.
- Använd endast medföljande laddningskabel.
- Batterierna måste laddas innan användning. Följ instruktionerna.
- Efter längre tids förvaring utan användning, kan det vara nödvändigt att ladda batterierna flera gånger för att återfå full prestanda.
- Batterierna ger bäst prestanda i normal rumstemperatur 15-25°C.
- Om eventuell vätska läcker från batterierna, undvik att få det i kontakt med hud eller ögon. Om kontakt uppstått, skölj rikligt med vatten och uppsök vård.
- Rengör produkten med trasa fuktad med varmt vatten eller mildt rengöringsmedel. Torka bort all fukt med en mjuk, torr trasa. Använd ej starka rengöringsmedel.



Högtalare



	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> • Håll in knappen i 3 sekunder för att sätta på BST-100. Håll in knappen i 1 sekund för att stänga av. • BST-100 startar automatiskt i Bluetooth-läge och söker efter tillgängliga enheter. Om ingen enhet är parad, blir produkten upptäckbar (se Bluetooth-avsnitt)
	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen för återuppspelning.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen för att starta och pausa uppspelning.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen för att hoppa till nästa spår.
— VOL	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen för att sänka ljudet gradvis eller håll in knappen för att sänka kontinuerligt.
VOL +	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen för att höja ljudet gradvis eller håll in knappen för att höja kontinuerligt.
MODE	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen för att välja mellan Bluetooth- och micro-SD-läge. BST-100 startar automatiskt i Bluetooth-läge.
	<ul style="list-style-type: none"> • Blå LED-lampa indikerar att BST-100 är i Bluetooth-läge och kan spela upp streamat ljud/musik från annan Bluetooth-enhet. • Blinkande blå lampa – BST-100 är upptäckbar och redo att paras med annan Bluetooth-enhet. • Blå lampa med fast sken – BST-100 är parat med annan Bluetooth-enhet. • Det fasta blå skenet släcks efter ca 10 sekunder, så att ljuset inte stör din sömn. För att kontrollera att Bluetooth är på, tryck på valfri knapp och den blå LED-lampan tänds i 10 sekunder.
SD	<ul style="list-style-type: none"> • Grön LED-lampa indikerar att BST-100 spelar ljud från micro-SD-kortet. • Lampan släcks efter ca 10 sekunder, så att ljuset inte stör din sömn.
CHG	<ul style="list-style-type: none"> • Röd LED-lampa indikerar att BST-100 laddar. • Lampan lyser tills batteriet är fulladdat. Sedan minskar ljuset till ett svagt sken.

•	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrofon. BST-100 kan användas som handsfree-högtalare när du talar i en smartphone.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stereo/mono 3,5 mm hörlursutgång
	<ul style="list-style-type: none"> • Använd medföljande USB-kabel för att ladda eller ge strömförsörjning till BST-100 från annan USB-källa.
INPUT	<ul style="list-style-type: none"> • Ingång för 3,5 mm-kabel för att spela ljud från en extern enhet (t. ex. iPhone, iPod, MP3-spelare eller CD-spelare).
MICRO SD	<ul style="list-style-type: none"> • Ett micro-SD-kort med 10 terapiljud medföljer med BST-100. Kortet måste sättas in för att kunna spela upp ljudspåren. • Det är möjligt att byta micro-SD-kort för utökat ljudbibliotek.

Strömförsörjning

BST-100 kan användas som trådlös ljud/Bluetooth-enhet, då den har inbyggda uppladdningsbara batterier. Du kan också ha den inkopplad till strömförsörjning för kontinuerlig användning utan uppladdning.

Med batteri

1. Ladda det uppladdningsbara batterier helt innan du använder BST-100 första gången.
2. Koppla in den medföljande USB-kabeln i en kompatibel USB-port, t.ex. i en AC-laddare, dator eller laptop. Den röda lampan lyser när enheten laddas. När batteriet är fulladdat, minskar ljuset till ett svagt sken. Uppladdningstid ca 2-3 timmar.
3. Koppla ur USB-kabeln och använd enheten.
4. När batterinivån är låg blinkar den röda och den gröna LED-lampan. Ladda då batteriet på nytt.

OBS! När batteriet är helt urladdat, tar det ca 30 minuter uppladdning innan du kan använda enheten igen.

Med strömförsörjning

1. Koppla in den medföljande USB-kabeln i en kompatibel USB-port, t.ex. i en AC-laddare, dator eller laptop.
2. Använd enheten.



Spela upp musik via Bluetooth

Du kan spela upp musik på BST-100 från en annan enhet, t. ex. en mobiltelefon, dator eller laptop, via Bluetooth-uppkoppling.

1. Tryck och håll in POWER-knappen i 3 sekunder.
2. BST-100 startar automatiskt i Bluetooth-läge och den blå LED-lampan blinkar för att indikera att enheten är upptäckbar.
3. Aktivera Bluetooth på din andra enhet och leta efter BST-100 i listan för tillgängliga enheter. Para ihop enheterna.
4. Ett ”blip”-ljud och ett fast ljus från den blå LED-lampan indikerar att BST-100 är parat.
5. Sätt på ljudet/musiken på din andra ljudenhet. Ljudet hörs nu via BST-100.
6. Tryck på –VOL+-knapparna för att höja eller sänka volymen.
7. Tryck på >II-knappen för att pausa och återuppta uppspelningen.
8. Tryck på >I för att hoppa till nästa spår.
9. Tryck på I< för att spela spåret igen.

Vänligen observera:

- Du kan bara para ihop med en Bluetooth-enhet åt gången.
- Om parningen misslyckas, starta om BST-100 och försök igen.

Lyssna på ljud/musik från micro-SD-kortet

Du kan njuta av ljud eller musik från micro-SD-kortet. Med BST-100 följer ett micro-SD-kort förprogrammerat med 10 terapiljud.

1. Tryck och håll in POWER-knappen i 3 sekunder.
2. Enheten sätts automatiskt i Bluetooth-läge (ett ”blip”-ljud och ett blinkljus från den blå LED-lampan indikerar att enheten är i Bluetooth-läge, redo att para sig med annan Bluetooth-enhet).
3. Byt från Bluetooth-läge till SD-läge genom att trycka på MODE-knappen.
4. Den gröna LED-lampan tänds och indikerar att den är i SD-läge.
5. Det första ljudspåret på micro-SD-kortet spelas upp automatiskt.
6. Tryck på –VOL+-knapparna för att höja eller sänka volymen.

7. Tryck på >II-knappen för att pausa och återuppta uppspelningen.
8. Tryck på >I för att hoppa till nästa spår.
9. Tryck på I< för att spela spåret igen.

Vänligen observera:

- Lista och ordning på de förprogrammerade ljudspåren medföljer.
- Varje förprogrammerat ljudspår är 8 timmar långt så att du kan lyssna hela natten utan avbrott. När ett spår är slut övergår uppspelningen automatiskt till nästa spår.

Använd ett annat micro-SD-kort

Du kan använda ett annat micro-SD-kort än det som medföljer BST-100. Här följer några alternativ:

- Besök *Sound Oasis* hemsida www.soundoasis.com och ladda ner ljudspår till din dator. Flytta över dem till ett nytt micro-SD-kort och sätt in det i BST-100. Använd det på samma sätt som beskrivet under **Lyssna på ljud/ musik från micro-SD-kort**.
Sound Oasis terapiljudspår är ideala för nedladdning och användning. De är 8 timmar långa och spelas upp kontinuerligt utan avbrott.
OBS! Om du laddar ner nya spår på ditt existerande (inkluderade) mikro-SD-kort finns det risk för att du raderar tidigare spår om det inte finns tillräckligt med minne. Använd alltid ett nytt oanvänt kort för att ladda ner nya ljudspår på.
- Köp ett färdigprogrammerat micro-SD-kort från *Sound Oasis* hemsida www.soundoasis.com. Du kan själv välja vilka ljudspår du vill ha.
- Lägg ljudfiler från din dator på ett nytt micro-SD-kort. Dessa ljudspår blir inte 8 timmar långa, utan behåller sin ursprungliga längd.



Använd som telefonhögtalare

Din BST-100 kan fungera som handsfree-högtalare när du talar i telefon.

1. Tryck och håll in POWER-knappen i 3 sekunder.
2. BST-100 startar automatiskt i Bluetooth-läge och den blå LED-lampan blinkar för att indikera att enheten är upptäckbar.
3. Kontrollera att din mobiltelefon/trådlös telefon är Bluetooth-kompatibel och aktivera funktionen. Leta efter BST-100 i listan för tillgängliga enheter. Para ihop BST-100 med din telefon.
4. Ett ”blip”-ljud och ett fast ljus från den blå LED-lampan indikerar att BST-100 är parat.
5. Starta ditt samtal.
6. Du kan nu tala in i högtalarens inbyggda mikrofon (kontrollera att du riktar dig mot mikrofonen – hålet mellan CHG och hörlursuttaget) samtidigt som du hör personen du samtalar med från högtalaren.
7. Tryck på –VOL+-knapparna för att höja eller sänka volymen.
8. Du kan avsluta samtalet genom att trycka på >II-knappen.
9. Ring upp senaste nummer genom att antingen göra en återuppringning på din telefon eller genom att trycka och hålla in >II-knappen.

Vänligen observera:


- Du kan bara para ihop med en Bluetooth-enhet åt gången.
- Om parningen misslyckas, starta om BST-100 och försök igen.
- Om du mottar ett samtal samtidigt som du streamar musik/ljud till BST-100 kan du pausa musiken/ljudet och svara genom att trycka på >II-knappen. För att avsluta samtalet trycker du på >II-knappen igen.



Underhåll och skötsel

Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Miljö

Släng förbrukade batterier/produkter enligt gällande miljöföreskrifter. Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö. Batteriet i BST-100 bör återvinnas. Byt inte ut batteriet själv. Bo Edin AB  anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Service

Om systemet trots felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljningsstället eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer, bifoga kvitto eller faktura och ange felbeskrivning på returblankett (pdf), som finns att ladda ner på www.edin.se.

Teknisk information

Denna produkt är testad och godkänd inom ramarna för FCC-regler för att undvika störningar i hemmiljö. Produkten genererar, använder och utsänder radiofrekvensenergi och om installationen och användningen inte följer anvisningarna, kan det störa annan radio- och tv-kommunikation. Om det uppstår störningar (kontrollera genom att stänga av och sätta på produkten igen) kan följande steg provas:

- Flytta BST-100 till en ny plats.
- Öka avståndet mellan BST-100 och enheten som störs.
- Använd ett annat strömuttag än det som enheten som störs sitter i.
- Rådfråga en försäljare eller erfaren radio/TV-tekniker.

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se