

CM-BT2

Bluetooth-halsslinga

Bruksanvisning

Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en CM-BT2! CM-BT2 har inbyggd bluetooth och är en trådlös lyssningsenhet kompatibel med alla hörapparater med t-spole. Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

I förpackningen:


- Blåtandshalsslinga CM-BT2
- USB-laddare (5V, 0,5A)
- USB-laddningskabel (USB-A till 3,5mm, 120cm)
- UK reseadapter

Notera

1. **Musik** – Ljudkällan ska stödja Bluetooth A2DP
2. **Mediakontroll** – Ljudkällan ska stödja Bluetooth AVRCP
3. **Telefonanvändning** – Telefonen ska stödja Bluetooth HSP. (Headset profile) en del mobiltelefoner stödjer inte funktionen där man kan växla från musik till samtal.
4. **Datoranvändning** – Datorn ska stödja HSP. (Headset profile)
5. **TV** – för att möjliggöra lyssning från TV behövs tillbehöret TVB Streamer som överför ljud från enheter som inte är utrustade med egen Bluetooth-funktion

Översikt

1. Halslinga
2. Statusindikator
3. Inbyggd mikrofon
4. Multifunktionsknapp (på/av, svara, lägg på, para)
5. Extra volyminställning för halsslinga
6. Volyminställning (+/-) för halsslinga/hörlurar
7. Anslutning hörlurar och laddning

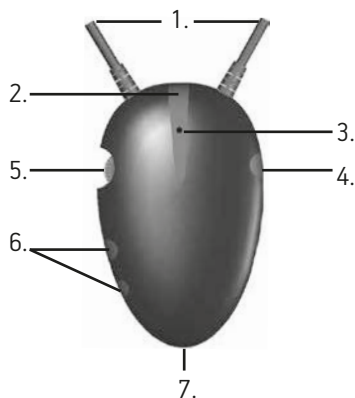

Laddning

CM-BT2 har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Ladda batteriet fullt (ca 3 timmar) innan användning första gången. Lyssningstid i släpa vid fullt batteri ca 3 timmar, standbytid ca 120 timmar.

1. Anslut laddningskontakt till uttag (7) via en USB-laddare eller en dator. Vid laddning lyser en röd LED.
2. När enheten är fulladdad slocknar den röda LED-indikatorn. Tag bort laddaren från enheten. LED-indikatorn blinkar långsamt rött när enheten behöver laddas.

Tabell för LED-indikation och multifunktionsknapp (4):

Enhetsstatus		Multifunktionsknapptryckning	LED-indikator	
Nuvarande	Resultat		Blå	Röd
AV	PÅ	Håll inne 3s	Blinkar 4x	
PÅ/standby	AV	Håll inne 3s		Blinkar 4x
AV	Parningsläge	Håll inne 6s	Blå blinkar 4x, Röd/Blå blinkar växlande i parningsläge, 2 minuter	
Parningsläge	Parning lyckas		Blinkar 4x	
Standby	Kopplad till telefon		Blinkar 2x	
Standby, kopplad	Återuppring senaste nr	Håll inne 1,5s		
Standby, kopplad	Röstuppringning	2 korta tryck	Efter tonen, säg röst-tag	
Ink. samtal	Svara	1 kort tryck	Blinkar 3x i 2s	
Ink. samtal	Avvisa	Håll inne 1,5s	Blinkar 3x i 2s	
Aktivt samtal	Avsluta samtal	1 kort tryck		
Standby, kopplad	Spela musik	1 kort tryck	Blinkar 2x	
Musik spelas	Pausa musik	1 kort tryck		
PÅ	Lågt batteri			Blinkar 1 gång/30s

Användning

Starta CM-BT2

Starta genom att hålla ner multifunktionsknappen (4) i 3 sek, den blå LED-indikatorn börjar blinka. Ett ljud hörs för att indikera att enheten slagits på. Om du tidigare parkopplat en enhet ansluts CM-BT2 automatiskt. **OBS! Om du håller inne knappen för länge så går enheten in i parningsläge.**

Stänga av CM-BT2

Tryck och håll in multifunktionsknappen (4) tills den röda LED-indikatorn börjar blinka, håll kvar tills den röda LED-indikatorn slocknar. Ett ljud hörs och indikerar att enheten slagits av.

Anslut CM-BT2 med annan Bluetooth-enhet, t ex mobiltelefon

Enheterna bör vara max 1m från varandra

1. Se till att CM-BT2 är fulladdad och i avstängt läge
2. Tryck på multifunktionsknappen (4) tills LED-indikatorn blinkar blått och rött (ca 6 sek)
3. Nu är CM-BT2 i parningsläge i 2 minuter
4. Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och sök efter ny enhet
5. Välj CM-BT2 i telefonens bluetooth-lista
6. Om det begärs inloggningskod, tryck 0000
7. Ett ljud hörs som indikerar att parningen lyckats

Svara på eller avsluta ett samtal

Tryck på multifunktionsknappen (4) på CM-BT2

Avvisa inkommande samtal

Tryck och håll in (1,5 sek) multifunktionsknappen (4) på CM-BT2.

Återuppringning av senaste telefonsamtal

Håll inne multifunktionsknappen (4) i 1,5 sek när enheten är i standbyläge och kopplad med din mobiltelefon.

Röstuppringning

Tryck på multifunktionsknappen (4) två gånger när enheten är i standbyläge och kopplad med din mobiltelefon för att aktivera funktionen. Efter tonen, säg din förprogrammerade röst-tag

Musikfunktionen

Spela/Paus: I standby-läge. Tryck kort på multifunktionsknappen (4) för att aktivera musik, tryck igen för att pausa.

Volym+/-: Tryck kort på +/- knapparna, du kan också använda volymhjulet för att justera volymen i halsslingan.

Felsökning

Om det inte går att ansluta CM-BT2 till din enhet, försäkra dig om att CM-BT2 är laddad och avslagen och försök sedan starta den i parningsläge igen genom att hålla inne multifunktionsknappen i 6 sekunder tills den börjar blinka växlande blått och rött. Försäkra dig om att din mobiltelefon har påslagen bluetooth och är i sökläge.

Om inget ljud hörs i slingan, försäkra dig om att enheten är korrekt kopplad och att 3,5mm säkerhetsanslutningen på slingan sitter fast ordentligt.

Underhåll och skötsel

- **OBS! Vik/rulla/knyckla inte ihop halsslingan, det kan orsaka brott och ogiltiggör garantin! Förvara ej heller enheten ihoprullad i fickan.**
- Undvik att bära halsslingan direkt mot kroppen, då svett m.m. kan ha negativ påverkan på halsslingan och dess funktion
- Behandla enheten med varsamhet och utsätt den inte för fukt, värme eller starkt solljus
- Rengör produktens ytor med en mjuk, luddfri trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel

Säkerhetsföreskrifter/garanti

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten.

Service

Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den lämnas till försäljningsstället.

Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket eller motsvarande till: Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö.

Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA), WEEE och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Manualen baseras på information tillgänglig vid trycktilfället och kan komma att ändras utan föregående meddelande. För mer information, besök www.edin.se



Bo Edin AB
Leveransadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Webb: www.edin.se

Email: info@edin.se
www.hörbutiken.se