



Art nr 110151

Innehåll

Introduktion	3
Översikt.....	3
Att ansluta kudden till en ljudkälla	4
Avlägsna eller sätta i högtalarna i kudden.....	4
Avlägsna högtalarna	4
Montera högtalarna	4
Tvätta kudden	4
I maskin.....	5
För hand	5
Använd högtalarna till en annan kudde.....	5
Säkerhetsföreskrifter/Garanti	5
Underhåll och skötsel.....	5
Felsökning	6
Teknisk information och service	6
Miljö och återvinning	6

Introduktion


Tack för att du har valt att köpa en SP-151 sov-/ljudterapi kudde som kan underlätta för dig med besvär med tinnitus. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder kudden.

Förpackningens innehåll:

- 1 x kudde med 2 st ultratunna högtalare och med 3,5 mm audiokabel

Översikt

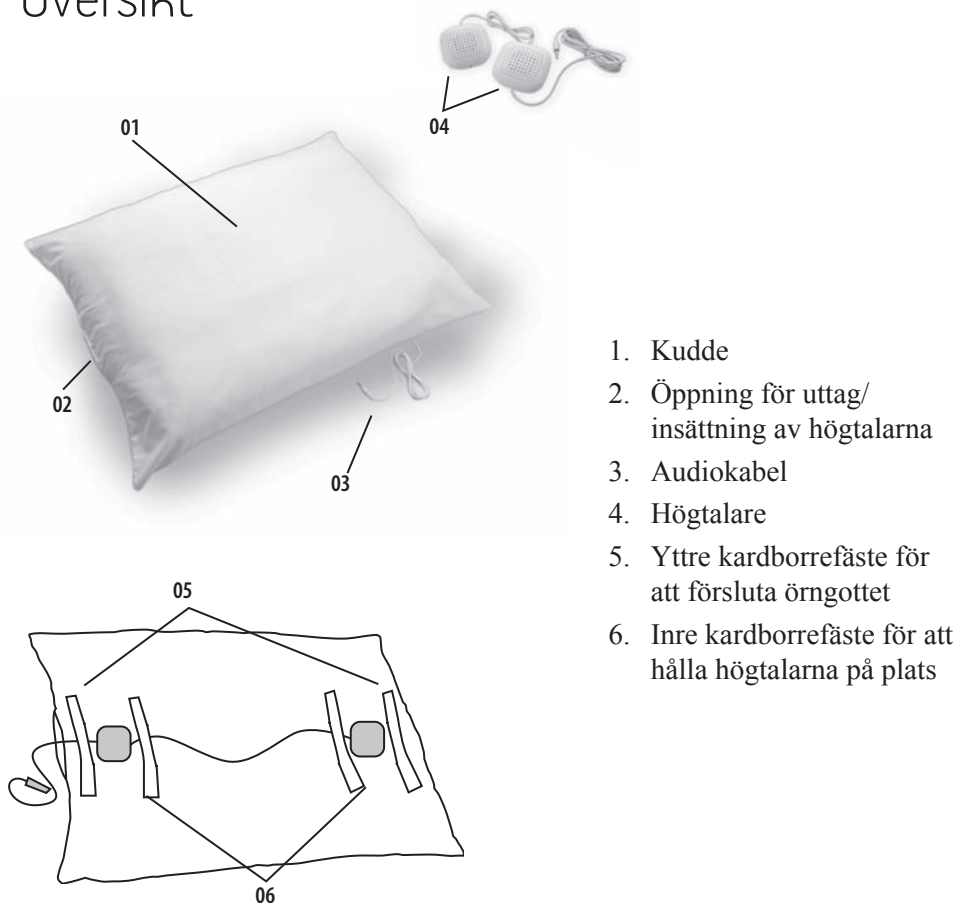

1. Kudde
2. Öppning för uttag/
insättning av högtalarna
3. Audiokabel
4. Högtalare
5. Yttre kardborrefäste för
att försluta örngottet
6. Inre kardborrefäste för att
hålla högtalarna på plats

Att ansluta kudden till en ljudkälla

Din sovterapikudde har 2 st stereohögtalare. Dessa kan lätt plockas bort när du behöver tvätta kudden, läs mer i avsnittet om tvättråd.

Anslut kontakten till högtalarutgången på den ljudkälla du vill använda för att spela musik via din sovterapikudde. Om du använder ett Sound Oasis Ljudterapisystem skall kontakten anslutas till hörlursuttaket.

Justera volymen på din ljudkälla. Om inget ljud hörs kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i ljudkällan.

Om ljudet låter dämpat vänd på kudden och lyssna med den andra sidan.

Avlägsna eller sätta i högtalarna i kudden

Din sovterapikudde är utrustad med två stereohögtalare och ett högtalarfack i kudden som håller högtalarna på plats. Facken öppnas och stängs med hjälp av kardborreband.

Avlägsna högtalarna

Dra isär det yttre kardborrefästet där kabeln kommer ut ur kudden. Öppna även det inre kardborrefästet. Gör samma sak på motstående sida. Dra ut högtalarna ur kudden.

Montera högtalarna

Öppna de yttre och inre kardborrbanden i båda ändarna av kudden. För igenom högtalaren och kabeln till andra sidan av kudden. Fäst högtalaren i sitt fack med de båda kardborrbanden och gör samma sak på motstående sida.

Tvätta kudden

Din sovterapikudde kan tvättas både i maskin och för hand.

I maskin

Tvätta i maskin på 40°C med ett skonsamt program. Kudden kan torktumlas.

För hand

Din kudde kan handtvättas i handfat eller badkar. Använd ett mild tvättmedel och varmt vatten. Skölj flera gånger i kallt vatten. Krama ur vattnet och låt kudden dropptorka.

Använd högtalarna till en annan kudde

Högtalarna som ingår i sovterapikudden kan användas med andra kuddar. Placera helt enkelt högtalarna under den kudde du föredrar.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av produkten.

Underhåll och skötsel

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Använd inte kudden med för lång sladd, utan samla ihop den kabel som inte behövs och fäst ihop den.

Använd inte kudden i närheten av små barn.

Använd inte kudden om anslutningsladden är skadad.

Placera inte produkten där den utsätts för starkt solljus, element eller andra värmealstrande källor, regn, vatten eller fuktiga omgivningar.

Om högtalarna skulle bli smutsiga, torka dem då med en lätt fuktad trasa (ej våt!). Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning

Kontrollera att audiokabeln är rätt ansluten/isatt. Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information och service



Kuddens storlek: 51 x 66 cm

Örngott: 100 % polyester.

Fyllning: 100 % polyester.

Högtalarkontakt: 3,5 mm

Impedans/Uteffekt: 4 ohm/2 watt

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning



Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och EI-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

| www.edin.se

| www.horbutiken.se /
| www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

