

## Starkey Avfuktare för Hörapparater

Tar bort fukt från alla typer av i-örat och bakomörat hörapparater som går att återanvända om och om igen.

### Instruktionsanvisning:

- Ta ut batteriet ur hörapparaten
- Placera hörapparaten i burken ovanpå skumlocket
- Stäng burken
- Låt hörapparaten ligga tex över natten
- När du vill använda hörapparaten igen, ta ut den ur burken och sätt i batteriet igen

De blå pärlorna i burken ändrar färg när de absorberat en viss mängd fukt, de blir då rosa.

Det går att torka dem för att sedan kunna fortsätta använda avfuktaren som vanligt.



Art nr: ST-60050-000  
07/2018

### Torkning av pärlorna

Torka pärlorna i mikrovågsugn eller i vanlig ugn.

#### Mikrovågsugn:

Sprid ut pärlorna i ett kärl som tål mikro. Mikra pärlorna på hög effekt i 3 minuter. Om vissa pärlor fortfarande är rosa efter 3 minuter, mikra ytterligare 3 minuter. Repetera tills alla pärlor är blå.

#### Vanlig ugn:

Sprid ut pärlorna i ett ugnstål kärl. Sätt ugnen på 150°C och låt pärlorna torka i ugnen i 3 timmar.

#### Varning!

Håll alltid burken stängd och utom räckhåll för barn. Placera inte över öppen eld.

Placera aldrig burken i ugnen, endast pärlorna.

Om pärlorna svalts-drick två glas vatten och framkalla kräkning.

Innehåll: 100 % Indikerande Silikongel