

Wake'n'Shake Curve

Bruksanvisning





Väckarklocka med starkt akustiskt och
optiskt alarm samt vibrator

Innehåll

Översikt	3
Nätdrift	4
Batteri (backup)	4
Ställa klockan och bestämma Snooze-intervall	4
Ställa in alarm	4
Sätta på/stänga av och välja larmläge	5
Ställa in larmvolym (Buzzer)	5
Stänga av alarm	5
Använda Snooze	5
Ställa in ljusstyrka på skärmen	6
Ladda mobilen via USB-porten	6
Felsökning	6
Underhåll och skötsel	6
Säkerhetsföreskrifter/garanti	7
Teknisk information och service	7
Miljö och återvinning	7

Översikt

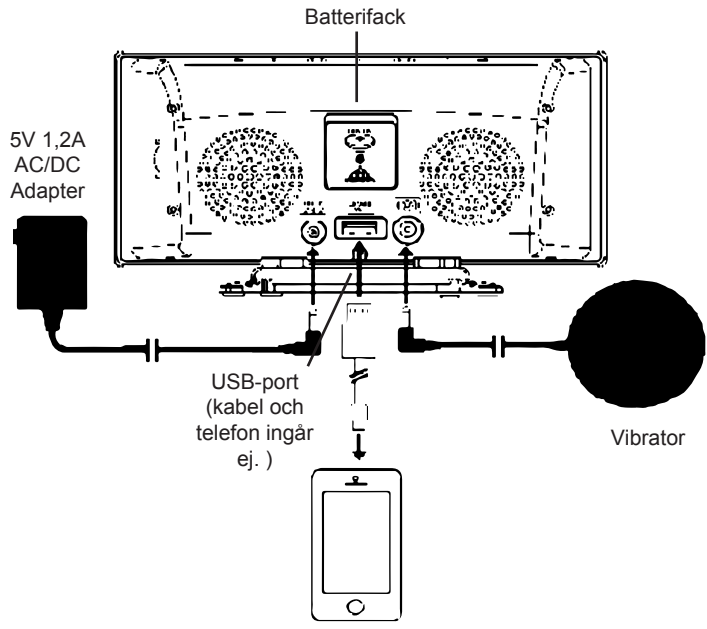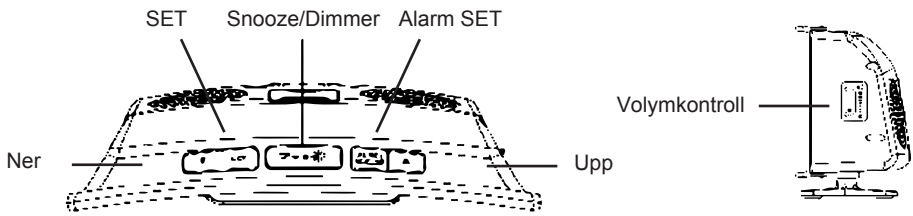

Nät drift

För att skärmen och alla larmfunktioner ska fungera måste klockan vara ansluten till elnät. Sätt i nätadaptern i vägguttaget och sedan i väckarklockan.

Batteri (backup)

Klockan behöver ett CR2032-knappcells batteri (ingår ej) för att behålla tiden vid eventuellt strömavbrott.


- Ta bort batterilocket på baksidan genom att dra den uppåt.
- Placera batteriet med “+”-sidan upp.
- Sätt på batterilocket.

Det är inte nödvändigt att sätta in ett batteri för att klockan ska fungera, men batteriet behåller tidsinställning och alarmval när sladden dras ut eller vid strömavbrott. Vid enbart batteridrift släcks skärmen och larmfunktionerna fungerar ej. Byt batteri en gång om året för att säkerställa backup.

Ställa klockan och bestämma Snooze-intervall





- Tryck på SET en gång, tim-siffra “0” blinkar. Välj med Upp- eller Ner-knapparna för att ställa rätt timme. (Håll inne knappen för snabbare bläddring.)
- Tryck på SET igen. Minutsiffror “00” blinkar. Välj med Upp- och Ner-knapparna för att ställa rätt minuter. (Håll inne knappen för snabbare bläddring.)
- Tryck på SET igen. “24Hr” blinkar på skärmen. Välj med Upp- och Ner-knapparna för att välja “12Hr”- eller “24Hr”-timmarsvisning. (Skärmen visar PM-indikering vid 12-timmarsvisning. Ingen AM-indikering visas.)
- Tryck på SET igen. “05” blinkar på skärmen. Välj med Upp- och Ner-knapparna för att ställa in Snooze-intervall; 5 - 60 minuter.
- Tryck på SET igen (eller vänta 10 sekunder) för att avsluta.

Ställa in alarm

- Tryck på AL SET / SELECT i minst två sekunder. Tim-siffror och alarm--indikatorn blinkar. Välj med Upp- eller Ner-knapparna för att ställa in rätt timme. (Håll inne knappen för snabbare bläddring.)
 - Tryck på AL SET / SELECT igen. Minutsiffror “00” blinkar. Välj med Upp- och Ner-knapparna för att ställa rätt minuter. (Håll inne knappen för snabbare bläddring.)
-

- Tryck på AL SET / SELECT igen. ”HI” (vibration hög nivå) visas på skärmen. Välj mellan ”Hi” och ”Low” (vibration Låg nivå) med Upp- och Ner-knapparna.
- Tryck AL SET / SELECT igen. ”F-1 (ex. 800 Hz) och blixk visas på skärmen. Välj larmton (frekvens) med Upp- och Ner-knapparna:
F-1 (låg ton, 800 Hz), F-2 (mellanton 1 KHz), F-3 (hög ton, 1,5 KHz)
- Tryck AL SET / SELECT (eller vänta 10 sekunder) för att avsluta.

Sätta på/stänga av och välja larmläge

- Tryck på AL SET / SELECT och välj larmläge, en i taget.
 1.  endast vibration
 2.  vibration och akustiskt ljudlarm
 3.  vibration och optiskt larm
 4.  vibration, akustiskt larm och optiskt larm
- Tryck på AL SET / SELECT igen för att stänga av alla alarm (ingen indikator lyser)

OBS! För att vibrationslarmet ska fungera måste den externa vibratorm kopplas in på baksidan av väckarklockan.

Ställa in larmvolym (Buzzer)


Använd tumhjulet på väckarklockans högra sida för att ställa in det akustiska larmets volym.

OBS! Wake'n'Shake Curve kan ställas in med mycket hög ljudnivå - vänligen öka volymen gradvis för att hitta en lämplig nivå.

Stänga av alarm


När alarmet är igång blinkar korresponderande indikatorer på skärmen. Tryck på AL SET / SELECT en gång för att stänga av larmet. Klockan sparar den valda larminställningen till nästkommande dag. De valda larmen syns på skärmen.

Använda Snooze

Tryck på **Zz** •  en gång, när larmet är igång. Då stoppas alarmet tillfälligt och de korresponderande indikatorerna på skärmen fortsätter att blinka. Alarmet går på igen efter att den angivna snooze-tiden gått. Förinställningen är 5 minuter.

Ställa in ljusstyrka på skärmen

Skärmens ljusstyrka kan ställas in i tre nivåer. Den förinställda är hög (HI).

Tryck på **Zz** •  för att justera ljusnivån (HI/MED/LOW). Detta går inte att göra samtidigt som alarmet är igång.

Ladda mobilen via USB-porten

Sätt i USB-kabeln i USB-porten på klockans baksida och sedan in i telefonen. Mobilen laddas automatiskt. Det går inte att ladda iPad eller notebook från denna USB-port.

OBS! Använd endast medföljande nätadapter till väckarklockan.

Felsökning

Om klockan visar fel tid eller inte fungerar korrekt, kan det bero på elektrostatisk urladdning eller annan elektrisk störning.

Klockans nätadapter bör sitta direkt i vägguttaget, ej i grenuttag som delas med annan utrustning med hög effektförbrukning.

Underhåll och skötsel

- Placera väckarklockan på en stabil och slät yta där den inte utsätts för regn, vatten, fuktiga omgivningar eller starkt solljus/värme.
- Ställ den gärna på en duk eller annat skyddande material för att undvika märken på trä- eller lackerade ytor.
- Tvätta väckarklockan med en lätt fuktad (ej våt) trasa och milda rengöringsmedel. Koppla ur nätadaptern innan rengöring.
- Ta ur batteriet om klockan inte ska användas under en längre tid, för att undvika korrosion. Om batterifacket blir korroderat eller smutsigt, rengör noggrant och byt ut batteriet. Koppla ur nätadaptern innan rengöring.

Säkerhetsföreskrifter/garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten och använd de batterier som tillverkaren rekommenderar.

Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av produkten.

Teknisk information och service

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och EI-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.





Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se